

管灌幫浦操作流程 (Feeding Pump)

面板說明

鍵盤鎖/
音量大小


調整流速

設定輸注總量

開始/停止鍵

開關

累計輸注量

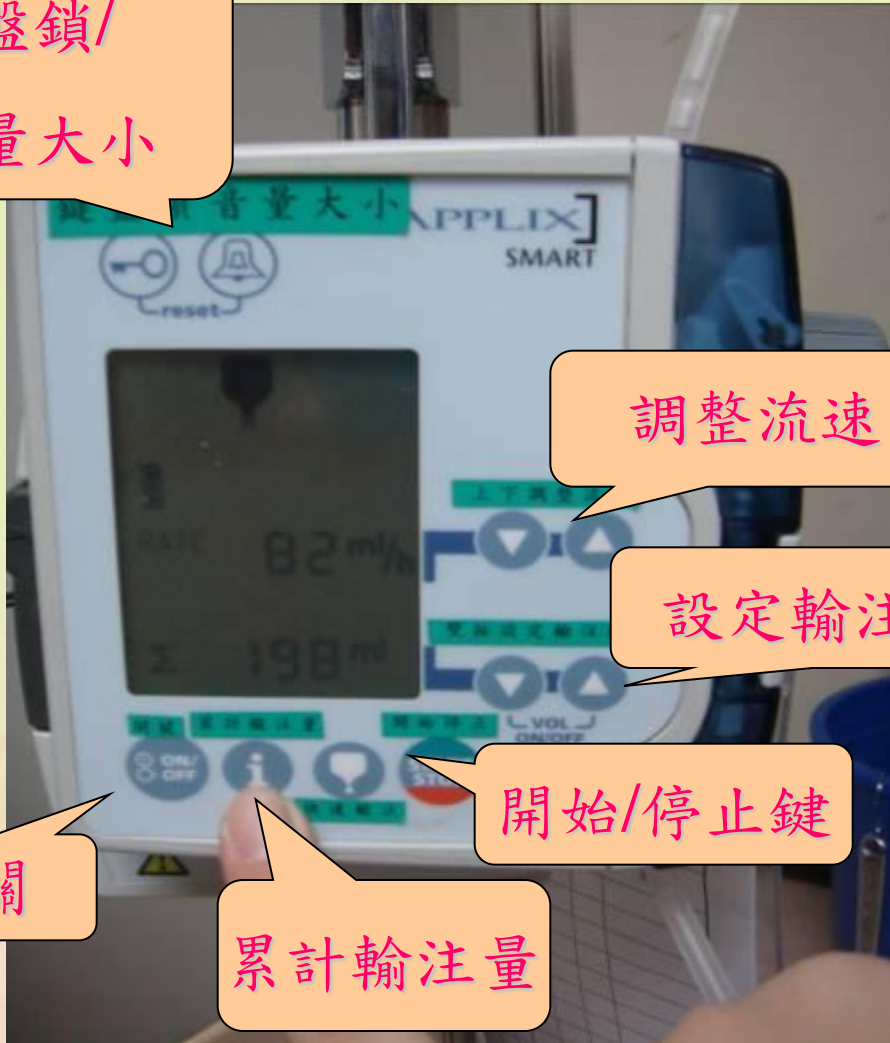

準備用物

Feeding Pump




Feeding Bag



以開水排氣



Feeding Bag 裝 至 Pump

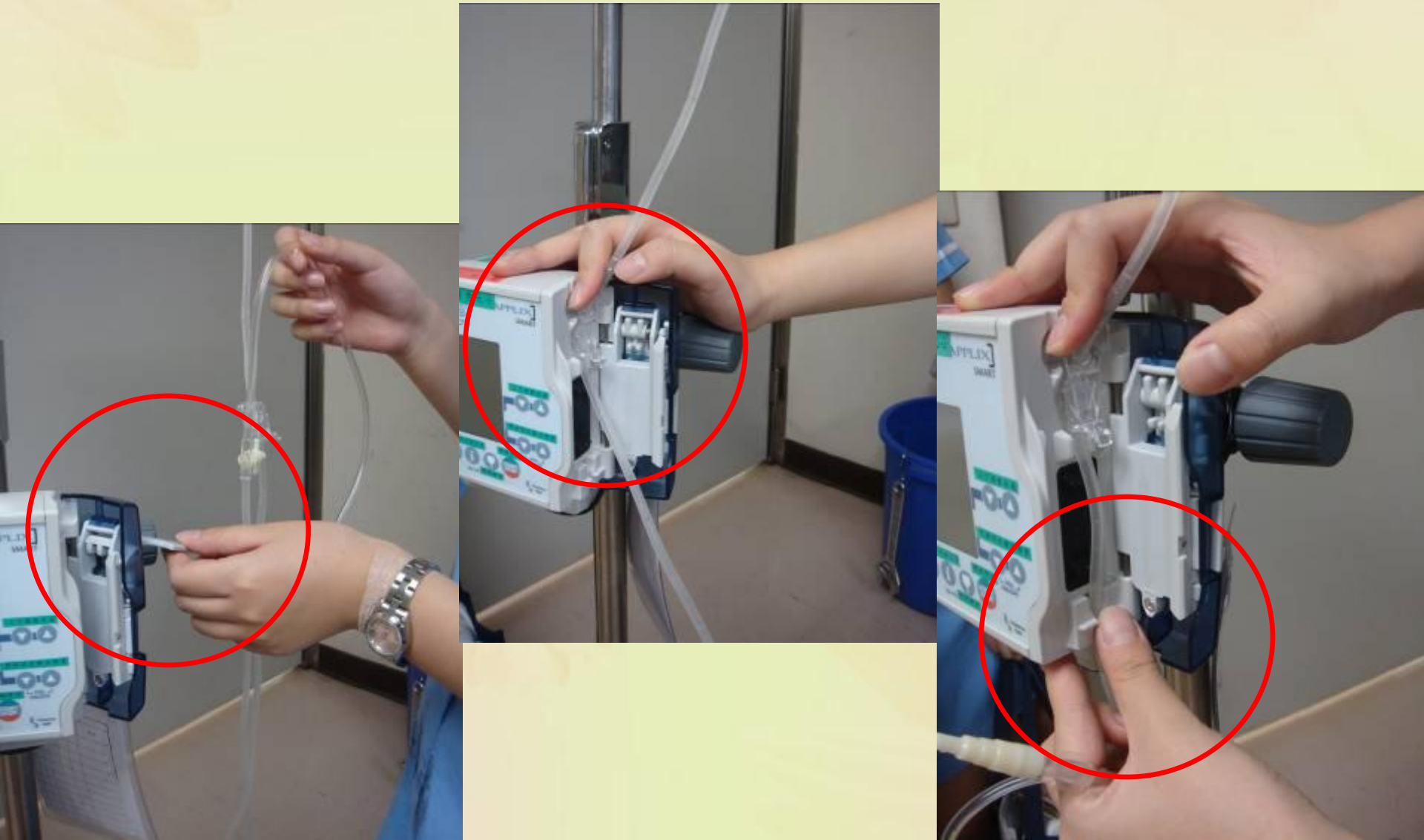

開始設定餵食量與餵食速度



餵食中可進行灌食藥物或灌水



1. 將此開關轉90度
2. 以針筒接至此開關
3. 打完藥物或水再轉回90度
4. 取回針筒

此處接鼻胃管